

YBUYOO NANO TECHNOLOGY REUSABLE MASK

Anleitung zu NANO FFP2 Schutzmaske(wiederverwendbar)

ANWENDUNG:

1. Klappen Sie die Maske auf, befestigen Sie die Bänder um die Ohren.
2. Den Nasenbügelstreifen zusammendrücken und fixieren.
3. Die Maske an den Seiten andrücken, um sicherzustellen, daß Sie vollständig auf Ihr Gesicht passt. (siehe Abbildung)



HINWEIS:

1. Nach dem Gebrauch legen Sie die Maske bitte flach zusammen, um den Nasenbügel nicht zu beschädigen.
2. Das Tragen der Maske wird nicht empfohlen, wenn Sie nicht genügend Luft bekommen und die Atmung nicht gleichmäßig ist.
3. Waschen oder desinfizieren Sie die Maske nach dem Gebrauch vorsichtig mit der Hand .
4. Wir empfehlen, die Maske nach etwa 20-maliger Reinigung auszutauschen.
5. Lagern Sie die Maske bei Nichtverwendung bitte an einem trockenen und kühl gelegenen Ort.

ACHTUNG! NUR HANDWÄSCHE BIS 60 Grad Celsius!

HERSTELLER:

Henan Ybuyoo Technology Co.,Ltd.

Address: No.79, East Section of Huaxing Avenue, Xihua Country, Zhoukou City, Henan Province, China